


Minivette® POCT

Prélèvement et distribution de petits échantillons sanguins pour tests au point d'intervention



Minivette® POCT

- Restitution facile de l'échantillon grâce aux fonctionnalités optimales du tube capillaire
- Distribution précise de faibles volumes de sang total
- Empêche toute fuite accidentelle lors du transfert sur le support d'analyse
- Volumes disponibles: 10 µl, 20 µl, 50 µl, 100 µl et 200 µl
- Préparations: Neutre, Héparine et EDTA

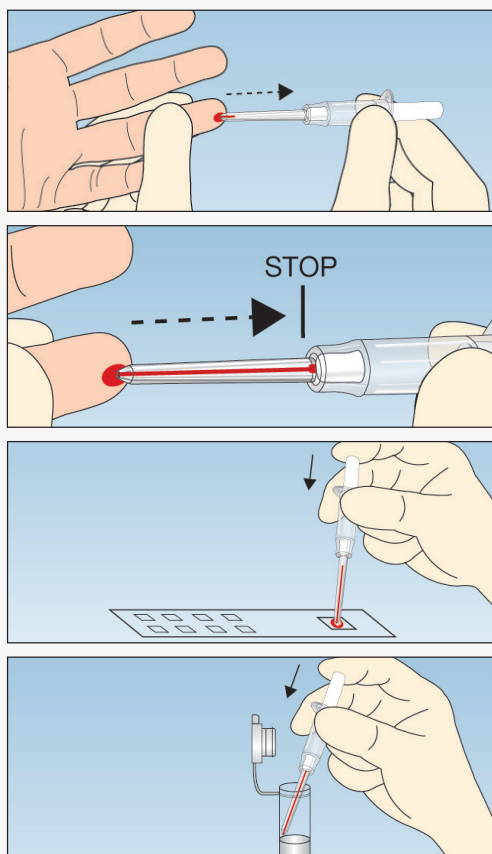

1 Tenir la Minivette® POCT de chaque côté sous les ailettes, en position horizontale légèrement inclinée. Veiller à ne pas obturer l'orifice de ventilation à l'extrémité du piston et à ne pas appuyer sur le piston. Collecter les gouttes de sang à l'aide de la pointe capillaire en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air.

2 Le prélèvement est terminé dès que le sang atteint le filtre blanc à l'autre extrémité de la pointe capillaire.

3a Placer la pointe du capillaire sur le support d'analyse et appuyer sur le piston pour distribuer l'échantillon de sang total.

3b Il est également possible de déverser l'échantillon dans un microtube.

Tous les échantillons sanguins des patients doivent être traités comme potentiellement dangereux. Le port de gants s'impose!

Références pour commande

Art. n°	Description	Code couleur	Conditionnement
NOUVEAU 17.2111.920	Minivette® POCT avec bouchon 20 µl neutre	blanc	Emballage ind. 100 pièces/boîte / 1.000 pièces/carton
17.2111.010	Minivette® POCT 10 µl neutre	blanc	200 pièces/boîte / 2.000 pièces/carton
17.2111.020	Minivette® POCT 20 µl neutre	blanc	
17.2111.050	Minivette® POCT 50 µl neutre	blanc	
17.2111.100	Minivette® POCT 100 µl neutre	blanc	
17.2111.200	Minivette® POCT 200 µl neutre	blanc	150 pièces/boîte / 1.500 pièces/carton
17.2112.020	Minivette® POCT 20 µl Héparine de Lithium	orange	200 pièces/boîte / 2.000 pièces/carton
17.2112.120	Minivette® POCT 20 µl Héparine de Lithium	vert	
17.2112.050	Minivette® POCT 50 µl Héparine de Lithium	orange	
17.2112.150	Minivette® POCT 50 µl Héparine de Lithium	vert	
17.2112.100	Minivette® POCT 100 µl Héparine de Lithium	orange	
17.2112.101	Minivette® POCT 100 µl Héparine de Lithium	vert	
17.2112.200	Minivette® POCT 200 µl Héparine de Lithium	orange	150 pièces/boîte / 1.500 pièces/carton
17.2112.201	Minivette® POCT 200 µl Héparine de Lithium	vert	
17.2113.020	Minivette® POCT 20 µl EDTA	rouge	200 pièces/boîte / 2.000 pièces/carton
17.2113.120	Minivette® POCT 20 µl EDTA	violet	
17.2113.050	Minivette® POCT 50 µl EDTA	rouge	
17.2113.150	Minivette® POCT 50 µl EDTA	violet	
17.2113.101	Minivette® POCT 100 µl EDTA	violet	
17.2113.201	Minivette® POCT 200 µl EDTA	violet	

SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tél.: 03 84 31 95 95
Fax: 03 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com