

Torniquete de uso individual

diseñado para la prevención eficaz de infecciones



- Reutilizable en un mismo paciente, como protección contra contaminación cruzada
- Material suave y confortable, libre de latex, para mayor comodidad del paciente
- Manipulación sencilla e intuitiva
- Único tamaño. Apto para bebés y adultos

Manipulación sencilla con una sola mano

TourniSTRETCH® se ha diseñado para ofrecer una prevención eficaz contra infecciones.

Fabricado en un material adaptable: aporta al usuario una elasticidad y seguridad para un tensado óptimo; al mismo tiempo, es suave y cómodo para el paciente.

Práctico para el usuario: sistema intuitivo, tensado simple y desabrochado rápido.

Manipulación fácil con una sola mano durante la extracción de sangre.



Instrucciones de uso



Colocar el TourniSTRETCH® alrededor del brazo, con el cierre hacia arriba



Pasar el torniquete por el cierre y tensarlo



Pasar el extremo del torniquete por encima del cierre y fijar la posición



Más información en www.sarstedt.com/tournistretch

Información

Referencia	Descripción	Presentación
95.1008	Torniquete TourniSTRETCH®	25 uds/bolsa, 500 uds/caja

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoríol
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com