

# HENm/HENm Cart

Sistema di etichettatura automatica delle S-Monovette® specifica per paziente prima del prelievo



## Tube Labeler HENm (unità da tavolo) e HENm Cart (versione mobile)

- Etichettatura automatica di S-Monovette® con specifiche per paziente ricevute da LIS o KIS
- 1 set per paziente contenente provette barcodeate, etichette supplementari e ricevuta
- Nessuna etichettatura errata, nessuna provetta errata
- Sicurezza di processo nel laboratorio grazie a etichette perfettamente posizionate

## Sicurezza del processo dal prelievo ematico fino al laboratorio

L'etichettatura manuale di provette per prelievo ematico rappresenta una potenziale fonte di errore. Può accadere che le etichette siano posizionate in modo errato, causando interferenze durante l'analisi in laboratorio, o che siano applicate alla provetta sbagliata (codice materiale errato) oppure che vengano dimenticate alcune provette, rendendo necessaria una richiesta successiva e perdendo tempo prezioso.

HENm e HENm Cart preparano set completi per il paziente, con S-Monovette perfettamente etichettate. L'applicazione nell'ospedale o negli ambulatori può avvenire in un luogo centralizzato oppure mediante utilizzo dell'unità mobile direttamente vicino al paziente. Le informazioni provenienti dal KIS (dell'unità sistema informativo dell'ospedale) o dal LIS (sistema informativo del laboratorio) stabiliscono quali S-Monovette sono necessarie. Possono essere stampate etichette anche per altri contenitori di campioni, ad es. bicchieri per urina, tamponi per striscio, ecc. La stampa della ricevuta riassume le informazioni e conclude il processo.

Con il miscelatore a vortex integrato, l'HENm Cart assicura l'alta qualità del campione. Le provette vengono miscelate subito dopo il prelievo di sangue. La batteria integrata alimenta in modo sicuro l'HENm, il miscelatore a vortex e il PC durante il percorso fino alla stazione.



Vassoio con set per paziente



Miscelatore a vortex sull'HENm Cart



Stampa ricevuta

## Dati tecnici

	Tube Labeler HENm	Tube Labeler HENm Cart (versione mobile)
<b>RIF. SARSTEDT</b>	90.191.450	90.191.451
<b>Resa</b>	fino a 1.400 provette/ora; circa 900/ora nel funzionamento di routine	fino a 1.400 provette/ora; circa 900/ora nel funzionamento di routine
<b>Tipi di S-Monovette®</b>	diametro: 11–16 mm lunghezza: 75–129 mm (incl. tappo e asta stantuffo)	diametro: 11–16 mm lunghezza: 75–129 mm (incl. tappo e asta stantuffo)
<b>Numero di tipi di S-Monovette®</b>	max. 14	max. 14
<b>Capacità caricatore</b>	max. 140	max. 140
<b>Alimentazione provette</b>	in posizione orizzontale nello scomparto, allineate	in posizione orizzontale nello scomparto, allineate
<b>Uscita del set</b>	vassoio aperto	vassoio aperto
<b>Metodo di stampa</b>	termica diretta	termica diretta
<b>Misure etichette</b>	45x30 mm	45x30 mm
<b>Tipo codice a barre</b>	tutti i comuni 1-D, Data Matrix	tutti i comuni 1-D, Data Matrix
<b>Stampante supplementare (integrata)</b>	per etichette extra	per etichette extra
<b>Rilevamento tipo di provetta</b>	sì	sì
<b>Rilevamento etichetta primaria</b>	sì	sì
<b>Batteria ricaricabile per alimentazione indipendente dalla rete</b>	no	sì – 13 ore di standby
<b>Miscelatore integrato</b>	no	sì – miscelatore vortex per 4 provette; 24 giri/min
<b>Dimensioni L x P x A</b>	199x599x396 mm	599x845x920 mm
<b>Peso</b>	20 kg	55 kg

SARSTEDT S.r.l.  
Via Leonardo Da Vinci, 97  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel: +39 02 38292413  
Fax: +39 02 38292380  
info.it@sarstedt.com  
www.sarstedt.com