



# Doux pour les animaux

Adapté aux animaux et conçu pour votre pratique



# Soigner les animaux dans les meilleures conditions



« Pour les grands chiens, nous utilisons la S-Monovette®. Nous pouvons ainsi remplir le tube d'échantillon très facilement et proprement, même d'une seule main ».

En tant qu'innovateur avec une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine du préanalytique en biologie humaine, SARSTEDT propose un grand nombre de solutions qui ont également fait leurs preuves en médecine vétérinaire et pour lesquelles l'hygiène, la convivialité d'utilisation et le bien-être des animaux sont au cœur des préoccupations.

Avec des produits tels que la S-Monovette®, nous établissons des normes d'hygiène pour le prélèvement sanguin veineux en système clos chez les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. Nous proposons également des solutions de prélèvement d'échantillon adaptées aux exigences spécifiques des tout petits patients, comme les petits mammifères, les oiseaux ou les reptiles.

Testez nos systèmes ingénieux et laissez-vous séduire par leurs nombreux avantages pratiques pour votre travail quotidien.

Prélèvement sanguin avec SARSTEDT. Adapté aux animaux et conçu pour votre pratique.

## Préanalytique par SARSTEDT

La phase préanalytique est la phase cruciale lors du diagnostic de chaque animal, car même avec la plus grande précision des analyseurs modernes, le résultat du dosage ne peut être fiable que dans la mesure où la qualité de l'échantillon le permet.

Grâce à notre expertise en préanalytique, nous sommes à vos côtés et nous vous fournissons des produits qui vous assistent au quotidien. Avec pour objectif de consacrer plus de temps aux animaux et aux propriétaires qui viennent dans votre cabinet.



« Si je n'obtiens que quelques gouttes de sang, la micro-aiguille me permet de toutes les récupérer, elle évite la coagulation à l'extrémité de l'aiguille ».



« L'utilisation de l'aiguille Multifly® me soulage énormément. Une fois ponctionnée, j'ai suffisamment de temps pour remplir les tubes échantillon nécessaires ».



« Nous appelons la Multivette® la « tétine ». Nous la connectons tout simplement à l'aiguille Luer et, durant la ponction veineuse, nous pouvons remplir deux ou trois tubes de sang ».

- ✓ Fiable
- ✓ Doux
- ✓ Hygiénique

Une solution adaptée à chaque animal – tous unis afin d'améliorer le bien-être de l'animal.

Votre cabinet vétérinaire reçoit des patients très différents, qui ont tous des besoins individuels. SARSTEDT vous propose des solutions adaptées pour le préanalytique en médecine vétérinaire.

- La S-Monovette® – prélèvement sanguin sûr, doux et hygiénique chez les grands animaux de compagnie
- La Multivette® – pour les petits animaux de compagnie, prélever le sang en douceur et facilement, uniquement par la pression veineuse.
- La micro-aiguille – recueillir chaque goutte en toute sécurité, même chez les animaux particulièrement sensibles, par exemple avec un micro-tube ou une Microvette®.
- De nombreux autres systèmes pratiques et produits uniques pour le prélèvement d'échantillons de sang, d'urine et de selles



# Prélèvement sanguin en système clos pour les grands animaux de compagnie



Le système de prélèvement sanguin S-Monovette® vous permet de réaliser un **prélèvement sanguin en système clos grâce à deux techniques**. La technique par aspiration permet un prélèvement doux, adapté au flux sanguin. Le double système de la S-Monovette® permet également de réaliser un prélèvement sanguin selon la technique sous vide conventionnelle.

## Système de prélèvement sanguin écologique

L'avantage du prélèvement sanguin avec une S-Monovette® est que le sang peut être prélevé directement dans le tube échantillon contenant déjà la préparation. Aucune seringue supplémentaire n'est nécessaire pour transférer l'échantillon de sang dans d'autres tubes. Cela permet d'économiser des ressources et rend le prélèvement sanguin plus sûr et plus hygiénique que les autres méthodes de prélèvement.

L'emballage en carton, plus durable, permet en outre de réduire les coûts d'élimination et le volume des déchets.

Faites de la visite dans votre clinique un événement positif pour vos patients et leurs propriétaires



Testez-la gratuitement !



animalhealthcare.  
sarstedt.com





« Aujourd'hui, je suis retourné chez le médecin, mais cette fois, c'était différent : tout s'est déroulé de manière totalement détendue.

Avant, je me faisais tout simplement piquer à la patte et ce liquide rouge se répandait partout. Aujourd'hui, tout s'est passé très rapidement et sans que rien ne soit gaspillé. Cela doit être dû au nouvel équipement du médecin.

Cela doit toujours se dérouler de cette manière à présent ! »

**Lucky, boxer mâle**

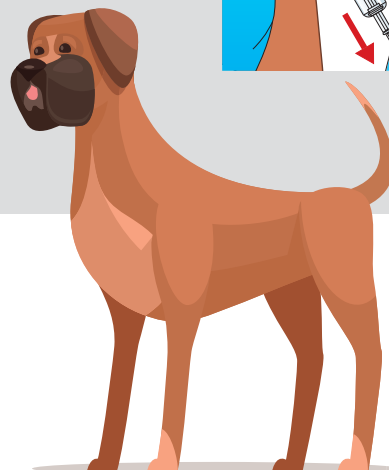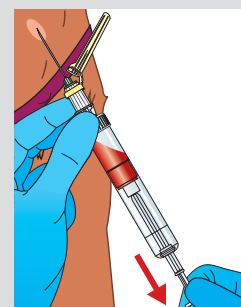

## La S-Monovette®

Protecteur d'aiguille Safety pour une utilisation d'une seule main

Connexion sûre et étanche grâce à l'adaptateur prémonté

Contrôle visuel de la réussite de la ponction veineuse grâce à la première goutte de sang qui entre dans la S-Monovette® ou dans la tubulure (pour l'aiguille Multifly® Safety).

La S-Monovette® est disponible pour des volumes de sang de 1,2 à 4,5 ml dans différentes préparations.

Prélèvement doux grâce à la technique par aspiration.



**À propos** la S-Monovette® peut aussi être utilisée avec l'aiguille Multifly® Safety.

# Prélèvement de sang sans stress des petits animaux de compagnie



La Multivette® 600 est conçue et préparée **pour de petites quantités de sang** de 600 µl. Le prélèvement s'effectue en circuit presque clos et fait appel à la pression veineuse. Le prélèvement est particulièrement sûr et simple.


L'échantillon de sang peut être centrifugé directement dans la Multivette® 600, ce qui facilite le prélèvement sanguin et permet un gain de temps.

Grâce au faible diamètre interne, le pipetage après la centrifugation est particulièrement facile. Qui plus est, l'échantillon peut être fermé en toute sécurité et envoyé au laboratoire.

## La Multivette® 600

Le tube interne de conception spéciale se remplit uniquement grâce à la pression veineuse

Différentes préparations pour des échantillons de sang de 600 µl

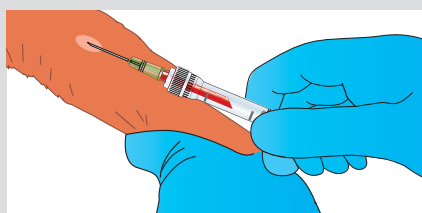


« Aujourd'hui, mes ouvreurs de boîte\* m'ont à nouveau mis dans cette caisse et m'ont retiré de celle-ci. Quand ils m'ont enfin laissé sortir, ils m'ont d'abord caressé.


Puis il s'est passé quelque chose de magique : on m'a mis un gadget sur le pelage, qui a simplement changé de couleur, passant du blanc au rouge, on m'a encore caressé et j'ai pu rentrer à la maison. Cela s'est très bien passé ».

**Bella, chat léopard du Bengale**

\*Ouvreurs de boîte signifie « humain » dans le monde félin.

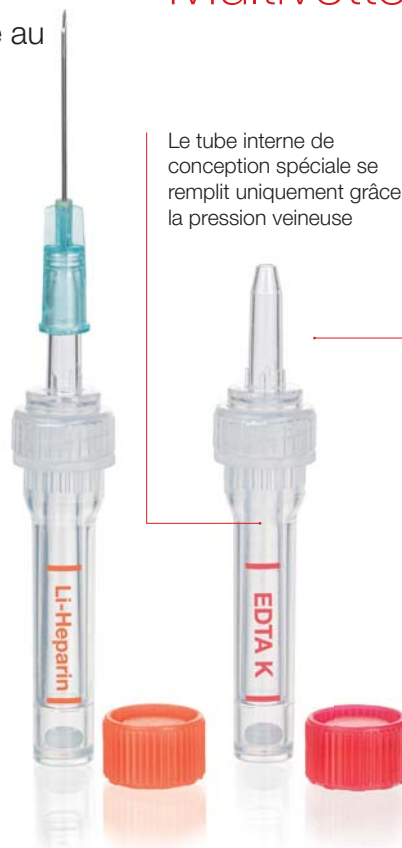

# Prélèvement sanguin en goutte à goutte pour les veines fragiles.

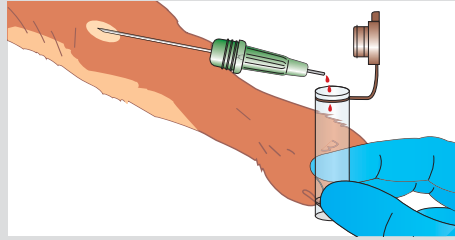

« Salut les gars ! Ma maîtresse s'inquiétait parce que je ne me sentais pas bien depuis quelques jours. Ma vétérinaire m'a tout d'abord fait une prise de sang afin de savoir pourquoi. Elle avait une aiguille conçue spécialement pour moi qui ne piquait presque pas. En fait, je n'ai rien senti.

Ma maîtresse était aussi beaucoup plus détendue que d'habitude. Cela peut s'expliquer par le fait que cela s'est passé très vite. Elle ne peut pas voir le sang... »

**Coco, chihuahua femelle**



## La micro-aiguille avec microtubes ou Microvette®

Chaque goutte de sang compte, notamment chez les petits animaux et **en cas de veines difficiles à prélever**. La micro-aiguille garantit que chaque goutte de sang s'écoule dans le tube d'échantillon et ne coagule pas avant. Le tube d'échantillon adéquat peut être choisi en fonction du volume d'échantillons attendu.

Les microtubes conviennent pour des quantités de 1,3 ml. Pour les tout petits patients, la Microvette® de 100 µl à 500 µl est un excellent choix.

Propriétés d'écoulement optimales

Perte de sang minimale sans volume résiduel dans l'embout

Le remplissage direct évite les pertes de sang dues à un transvasement ultérieur.

Flexibilité grâce aux différents volumes et préparations



Testez-la gratuitement !



animalhealthcare.sarstedt.com

 **SARSTEDT**

## SARSTEDT S.A.R.L

Route de Gray Z.I. des Plantes  
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

Service clientèle en Allemagne

Tél. +49 (0) 800 0 83 305 0

[info.fr@sarstedt.com](mailto:info.fr@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Plus d'informations et  
échantillons gratuits pour test :  
[animalhealthcare.sarstedt.com](http://animalhealthcare.sarstedt.com)

Pour toute question :  
Nous restons à votre écoute !

Consultez également notre site Internet : [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)